

PolyMem® SHAPES Sakraalhaavapadi kleepuv / SILVER Sakraalhaavapadi kleepuv

KIRJELDUS

Polymem SHAPES sakraalhaavapadi on loodud, et pakkuda sakraalpiirkonnas parima püsivuse tagamiseks spetsiaalse kujuga veekindlat haavasidet.

Polümeermembraanist haavasidemed PolyMem on valmistatud patenteeritud hüdrofiilsest polüuretaanmembraan-matriksist ning need sisaldavad:

1. Ohutut mittetoksilist haavapuhastusvahendit
2. Glütseriini
3. Superabsorbeerivaid kopolümeere

Haavasidemeid katab õhuke polüuretaanist kiht, mis on kaitseks mikroorganismide eest. See kaitsev kiht laseb liigsel niiskusel sidemest aurustuda, samas võimaldades hapniku juurdepääsu.

Polymem SHAPES sidemed kinnituvad nahale õhukese meditsiinilise akrüülfilmi abil. Seda võib kasutada nii primaarse haavasidemena kui ka sekundaarse haavasidemena kombineerituna Polymem WIC haavataitepatjadega.

Polymem SHAPES Silver sakraalhaavapadi kaitseb haava mikroobse saaste eest ja hävitab baktereid sideme sees. Padi sisaldab minimaalselt 124 mikrogrammi cm² kohta hõbeda nanopartikleid.

Polymem haavapadjad võimaldavad:

- tõhusat haavahooldust ja soodustavad haava paranemist
- imada vedelikku, lukustada see sidemesse ja pakkuda tänu lisatud glütseriinile haavaparanemist soodustavat niisket keskkonda
- minimeerida vajadust haava mehhaaniliselt puhastada ning seeläbi traumeerida
- vähendada ja leevendada püsivat või protseduuridest tingitud valu
- alandada turset ja verevalumeid ning vähendada põletiku kandumist haava ümbritsevasse, kahjustamata kudedesse.

NÄIDUSTUSED

Kättesaadav patsiendile apteegist ravimaks väikeseid haavu nende kergemate vormide korral, nagu:

- marrastused • rebendid • löikehaavad • põletused

Kasutamiseks meditsiinitöötaja poolt või juhendamisel tõsiste ja sügavamate haavade korral, nagu:

- lamatised (I–IV aste) • venoossed või arteriaalsed haavandid • akuutsed haavad • jalahaavandid • doonorpinnad • naharebendid • diabeetilised haavandid • nahahaigused (EB) • 1. ja 2. astme põletushaavad • kirurgilised haavad.

VASTUNÄIDUSTUSED

- Mitte kasutada patsientidel, kellel ilmneb seoses sideme kasutamisega tundlikkuse, ärrituse või allergia märke.
- Sidemed PolyMem ei sobi kokku oksüdeerivate ainetega (vesinikperoksiidi või hüpokloriidi lahused).

ETTEVAATUSABINÕUD

- Ainult välispidiseks kasutamiseks.
- Enne radioloogilisi protseduure tehke kindlaks sideme eemaldamise vajadus.
- Vältige kokkupuudet elektrodide ja juhtivate geelidega.
- Olge tähelepanelik infektsiooni ja matsratsiooni sümptomite suhtes.
- Mõeldud ühele inimesele üheks kasutamiskorraks. Mitte korduvkasutada. Korduvkasutamine võib halvendada tooteomadusi, olla nakkusohtlik või suurendada bakteriaalset nakatumisohtu.

Sidemeid PolyMem võib kasutada, kui esinevad infektsiooninähud ja kui on rakendatud õiget infektsiooni alget adresseerivat ravi.

Säilitada toatemperatuuril $\leq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($86\text{ }^{\circ}\text{F}$). Lubatud on kõrvalekalle $\leq 55\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($131\text{ }^{\circ}\text{F}$), kuid see peaks olema minimaalne.

Kõrvaldada kasutuselt sarnaselt teistele bioloogiliselt ohtlike jäätmetega.

KASUTUSJUHEND

Esmane paigaldamine ja haava ettevalmistamine

1. Valmista haav ette vastavalt protokollile või tervishoiutöötaja juhistele. Veendu, et haava ümbritsev nahk oleks kuiv ja puhas.
2. Vali haavapadi, mis on äärtest 0.5 – 5 cm suurem kui haav. Kuna Polymem sidemetel on põletikku alandav ja seda kontsentreeriv toime, siis võiks haavapadi katta ka haava ümbritseva piirkonna, mis on põletikus või turses.
3. **Kuivade haavade korral niisutada kergelt side puhta vee või soolalahusega enne haavale asetamist.**
4. Paigalda side haavale nii, et ruuduline membraanipool on väljapoole ning nähtav.
5. Märgista haavakontuurid sidemele, et paremini tuvastada vajadus sidemete vahetamiseks.

Kasutamine

1. Polymem haavapadja kasutamise alguses, esimesel paaril päeval võib täheldada eksudaadihulga kasvu. See ei ole ebatavaline ning viitab, et side töötab efektiivselt.
2. Hoia sidet kuivana ning vaheta, kui see saab märjaks.
3. Teiste paiksete ravimite kasutamine koos Polymem haavapatjadega ei ole soovitatav.

Sidemete vahetamine

1. Haavaeksudaadi erituses on see nähtav sideme pealmisel küljel. See aitab lihtsasti tuvastada õige hetke sideme vahetamiseks.
2. Side vajab vahetamist kui eksudaat on jõudnud haavaservani või hetkel, mille sätestab hea kliiniline tava. Maksimaalne sideme kandmise aeg vähese eritise korral on 7 päeva. Vaheta side kohe, kui eksudaat on jõudnud sideme servani.
3. Side võib vajada tihedamat vahetamist kaasuvate konditsioonide tõttu nagu näiteks immuunsüsteemihäired, diabeet, infektsioon, hüpergranulatsioon ja matsereerunud koed.
4. Sideme vahetamiseks eemalda see haavalt õrnalt, alustades eemaldamist servast liikudes haava keskossa. Polymem haavapadi ei kleepu enamasti haavale, mis tagab tavaliselt valuvaba sidemete vahetuse. Veendu, et haava ei ole jäänud sideme vahetamisel selle osakesi.
5. Juhul kui koaguleerunud veri on põhjustanud sideme kleepumise haava külge kasuta sideme eemaldamiseks väikest kogust soolalahust või vett. Puhasta õrnalt ka haava ümbritsev nahk.
6. Teosta sidemete vahetamise protseduurid vastavalt protokollile või tervishoiutöötaja juhistele. Enamik juhtudel Polymem haavasidemeid kasutades ei ole vajadust sidemete vahetamisel haava puhastada ning seda ärritada, välja arvatud infektsioonijuhtudel. Polymem on disainitud puhastama haava pidevalt sideme kandmise aja vältel ning ta ei jäta haava jääke, mis vajavad eemaldamist. **Liigne haavapuhastamine võib vigastada paranevat kudet ning lükata edasi haavaparanemist.**
7. Aseta haavale uus side.

Võimalikud tähelepanekud sideme kasutamisel või vahetamisel

- Esimeste sideme vahetamiste käigus võib märgata, et haav on muutunud suuremaks. See on normaalne ja tingitud keha naturaalsest haavapuhastamise protsessist, mille käigus toimub surnud koe eemaldamine. Kui haava suurenemine jätkub konsulteerige arsti või õega.
- Polymem haavasidemed aitavad kaasa uute veresoonte tekkele, seega on normaalne, kui märkate sidemete vahetamisel veresegust haavavedelikku.
- Sarnaselt teiste haavasidemete kasutamisega olge tähelepanelik sümptomite osas nagu suurenenud punetus, põletik, valu, temperatuur, lõhn, haava valgenemine, haprus, üleliigne koe moodustumine või

vähene paranemine. Konsulteerige arsti või õega probleemsetes olukordades nagu infektsioon, ärritus, liigtundlikkus, allergia, matsratsioon või hüpergranulatsioon.

by PolyMem®
Shapes®

REF 3709

Sacral

Directions for Use

AU REP

Emergo Asia Pacific Pty Ltd
201 Sussex Street
Darling Park, Tower II, Level 20
Sydney, NSW 2000 Australia

EC REP

Emergo Europe
Molenstraat 15
2513 BH The Hague
The Netherlands



FERRIS MFG. CORP.
5133 Northeast Parkway
Fort Worth, TX 76106-1822 U.S.A.
Toll Free U.S.A.: 800-765-9636
International: +1 817-900-1301
info@polymem.com
www.polymem.com



FMC-5989 REV.4 0715